

i-Pro™ Persoonlijk Respiratoir Protectiemasker – Fitting guide

Vorbereidingen voor gebruik

1.



Was voor gebruik uw handen en zorg ervoor dat het masker onbeschadigd is en vrij van obstructies of vreemde voorwerpen.

2.



Neem het masker in uw hand, vermijd contact met het filter en laat de elastische banden vrij onder uw hand hangen.

Aanbrengen van het masker

3.



Plaats het masker onder uw kin met het neusstuk omhoog. Trek de onderste band over uw hoofd en laat deze rond uw nek onder uw oren hangen.

4.



Trek de bovenste band over uw hoofd en plaats deze boven de oren, aan de achterkant van uw hoofd.

5.



Houd de voorkant van het masker tegen het gezicht en trek aan de bovenste elastische band aan de zijkant om het masker vast te zetten - zorg ervoor dat u niet in contact komt met het filtermedium terwijl u het masker op zet.

6.



Houd het masker opnieuw tegen het gezicht en trek aan de onderste elastische band aan de zijkant om het masker strakker te trekken.

7.



Om de seal van het masker te controleren, houdt u twee vingers boven het masker om te controleren of er geen lucht langs de seal ontsnapt wanneer u uitademt.

8.



Houd vervolgens beide handen onder het masker om te controleren of er bij het uitademen geen lucht langs de seal ontsnapt. Zorg ervoor dat u de positie van het masker niet verstoort. Als er lucht lekt, past u de positie van de banden aan en zorgt u ervoor dat de randen van het masker goed op het gezicht aansluiten.