

Pressione di Esercizio - *Operating Pressure*

MIN 3 - MAX 3,5 BAR

RICHIESTA REQUIREMENT		IMPOSTA SETTING		AL PAZIENTE TO PATIENT	
FiO ₂ (±5%)	PEEP cmH ₂ O	FLUSSO 0 ₂ FLOW Ⓐ + Ⓑ	FLUSSO FLOW L/min (±8%)		
40%	5	11	+	0	56
	7,5	12	+	0	58
	10	13	+	0	60
	12,5	14	+	0	66
50%	5	10	+	10	60
	7,5	11	+	10	62
	10	12	+	10	64
	12,5	13	+	10	66
60%	5	8	+	18	59
	7,5	9	+	18	61
	10	10	+	18	64
	12,5	11	+	18	65
70%	5	5	+	30	61
	7,5	6	+	30	62
	10	7	+	30	64
	12,5	8	+	30	65

Principio di funzionamento del sistema Venturi Starmed:
Starmed Venturi valve operating principle:

+ flusso in A = + flusso al paziente
(by increasing A ⇔ increased patient flow)

+ flusso in B = + FiO₂
(by increasing B ⇔ increased FiO₂)

Si raccomanda di usare le impostazioni fornite in tabella
Always refer to the performance table for therapy settings